



# Balance Foot

## CALCANHEIRA ADESIVA

### Indicações:

Dores na parte de baixo do calcanhar, causadas pela **Fascite Plantar (esporão calcâneo)** e pelo impacto repetitivo na região do calcanhar com o calçado com pouco amortecimento.

### Tipos de Calçados Compatíveis:

- Todos os tipos de calçados, principalmente nos calçados abertos, mas podem ser utilizadas também em sapatos fechados.
- Sua utilização em **calçados abertos**, sem contraforte (parte de trás do calçado), como sandálias, rasteirinhas e chinelas, é o diferencial dessa palmilha, pois sua **propriedade adesiva extra-forte permite que a palmilha se mantenha no lugar**, mesmo com o atrito do calcanhar.

### Como usar:

- Destaque o adesivo da parte de baixo da calcanheira e posicione a palmilha na parte mais posterior do calçado (parte de trás do calçado que entra em contato com o calcanhar), **por cima da palmilha original ou diretamente nos calçados sem palmilha**.
- O adesivo funciona como um antiderrapante forte e essa palmilha pode ser utilizada em calçados abertos (Sandálias, Rasteirinhas e Havaianas etc).

### Mecanismo de Ação:

Seu desenho propicia que a fásia plantar tenha alívio da dor e do processo inflamatório através da **absorção dos impactos do calcâneo com calçado/solo**.

## Como Lavar, Armazenar e Otimizar a Durabilidade:

- Lavar com pano umedecido e secar com papel toalha. Após a secagem, pode ser adicionado talco para manter o produto seco e sem umidade excessiva (não é obrigatório).
- **NÃO tentar removê-la do calçado ou trocá-la de calçado, pois irá perder sua propriedade adesiva.**
- Mantenha a palmilha e o calçados livres de objetos e materiais cortantes, como areia, sujeira e áreas com proeminências e atrito. Evite puxar, tracionar ou tencionar o produto.

## Composição: Silicone e Gel.

Observação:

Sempre procure um médico ou especialista antes da utilização de qualquer produto. Caso haja piora ou surgimento de alguma dor osteomuscular após sua utilização, procure seu médico.

Produzido por:  
**BALANCEFOOT**

Atendimento ao consumidor



(85) 9 9689-9696  
(85) 9 9703-4005

Siga a gente em  
nossas redes sociais:

 /@balance.foot  
balancefoot.com.br

Acesse para mais  
informações deste  
produto

