



Balance Foot

CALCANHEIRA COMFORT

Indicações:

Dores na parte de baixo do calcanhar, causadas pela **Fascite Plantar (esporão calcâneo)** e pelo impacto repetitivo na região do calcanhar com o calçado com pouco amortecimento.

Tipos de Calçados Compatíveis:

Todos os tipos de calçados fechados (Sapatos Sociais, Tênis, Sapato-Tênis, Sapatilhas etc).

Como usar:

Posicione a palmilha encostada no contra-forte do calçado (parte de trás do calçado que entra em contato com o calcanhar), **por cima ou por baixo da palmilha original**.

Mecanismo de Ação:

Seu desenho propicia que a fásia plantar tenha alívio da dor e do processo inflamatório através da **absorção dos impactos do calcâneo** com calçado/solo.

Como Lavar, Armazenar e Otimizar a Durabilidade:

- Lavar com água e sabão neutro e secar com toalha. Após a secagem, pode ser adicionado talco para manter o produto seco e sem umidade excessiva (não é obrigatório).
- Mantenha os produtos nas embalagens quando não estiverem sendo utilizados.
- Mantenha a palmilha e o calçados livres de objetos e materiais cortantes, como areia, sujeira e áreas com proeminências e atrito. Evite puxar, tracionar ou tencionar o produto.

Composição: Silicone e Gel.

Observação:

Sempre procure um médico ou especialista antes da utilização de qualquer produto. Caso haja piora ou surgimento de alguma dor osteomuscular após sua utilização, procure seu médico.

Produzido por:
BALANCEFOOT

Atendimento ao consumidor



(85) 9 9689-9696
(85) 9 9703-4005

**Siga a gente em
nossas redes sociais:**

 /@balance.foot
balancefoot.com.br

**Acesse para mais
informações deste
produto**

