



Balance  
Foot

MINICUNHAS ADESIVAS

#### Indicações:

Indivíduos com a **Pisada Pronada (pés planos)** ou **Supinada (pés cavos)** que têm **dores articulares** (Pés, Tornozelos, Joelhos, Quadrís ou Ombros), **torções nos tornozelos de repetição**, **alterações no equilíbrio**, **dificuldade durante as atividades físicas** ou **desgaste acentuado da região interna ou externa dos calçados**.

#### Tipos de Calçados Compatíveis:

- Todos os tipos de calçados fechados (Sapatos Sociais, Tênis, Sapato-Tênis, Sapatilhas etc).
- **Calçados abertos (colada com fita dupla face ou com auxílio de um sapateiro).**

#### Como usar:

- **Destaque o adesivo da parte de baixo da minicunha e posicione a palmilha no contra-forte do calçado** (parte de trás do calçado que entra em contato com o calcanhar), por cima da palmilha original.

- **Pisada Pronada: A borda mais elevada deve ficar na região interna do calcanhar.**

- **Pisada Supinada: A borda mais elevada deve ficar na parte externa do calcanhar.**

- O adesivo é apenas um antiderrapante e essa palmilha não pode ser utilizada usualmente em calçados abertos (Sandálias, Rasteirinhas e Havaianas etc).

- Para utilização nos calçados abertos, ela deve ser colada no calçado com fita dupla face ou com o auxílio de um sapateiro. Não a retire do calçado após fixada, pois há risco de danificar o calçado e a minicunha.

#### Mecanismo de Ação:

As minicunhas causam um **desnível de 5mm na região do calcanhar**, servindo como um calço para indivíduos que têm a **Pisada Pronada (pés planos)** ou **Supinada (pés cavos)**, o que **melhora o alinhamento dos pés e dos tornozelos**.

#### Como Lavar, Armazenar e Otimizar a Durabilidade:

- Lavar com pano umedecido e secar com papel toalha. Após a secagem, pode ser adicionado talco para manter o produto seco e sem umidade excessiva (não é obrigatório).

- **Não a remover do calçado ou trocá-la de calçado, pois irá perder sua propriedade adesiva.**

- Mantenha a palmilha e o calçados livres de objetos e materiais cortantes, como areia, sujeira e áreas com proeminências e atrito. Evite puxar, tracionar ou tencionar o produto.

#### Composição: Poliuretano, Gel e Courino.

Observação:


Sempre procure um médico ou especialista antes da utilização de qualquer produto. Caso haja piora ou surgimento de alguma dor osteomuscular após sua utilização, procure seu médico.



Acesse para mais  
informações deste  
produto

**Produzido por:  
BALANCEFOOT**

**Atendimento ao consumidor**

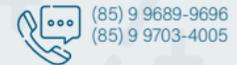

**Siga a gente em  
nossas redes sociais:**

 /@balance.foot  
balancefoot.com.br