



Balance  
Foot

BALANCE JOANETE SILIGEL

#### Indicações:

Deformidades em Joanete, Hálux Valgo, Dedos tortos ou sobrepostos, em garra e luxações ou subluxações das articulações MTF.

#### Tipos de Calçados Compatíveis:

- Todos os tipos calçados (Fechados ou Abertos), exceto aqueles com cabresto entre os dedos.
- Pode ser utilizado com e sem meias.

#### Como usar:

- Deve ser adquirida uma Balance Joanete Siligel de tamanho (P, M ou G) suficiente para corrigir a deformidade e ocorrer afastamento completo entre os dedos de forma que não haja atrito entre eles.
- **Posicione o espaçador entre os 1º e 2º dedos** e coloque o calçado em seguida.

#### Mecanismo de Ação:

Seu desenho propicia **conforto, alinhamento e correção da deformidade em joanete**, reduzindo dores, calosidades, infecções e micoses entre os dedos e evita a progressão da doença.

#### Como Lavar, Armazenar e Otimizar a Durabilidade:

- Lavar com água e sabão neutro e secar com toalha. Após a secagem, pode ser adicionado talco para manter o produto seco e sem umidade excessiva (não é obrigatório).
- Mantenha os produtos nas embalagens quando não estiverem sendo utilizados.
- Mantenha o produto e o calçados livres de objetos e materiais cortantes, como areia, sujeira e áreas com proeminências e atrito. Evite puxar, tracionar ou tensionar o produto.

#### Composição: Silicone.

#### Observação:


Sempre procure um médico ou especialista antes da utilização de qualquer produto. Caso haja piora ou surgimento de alguma dor osteomuscular após sua utilização, procure seu médico.



Acesse para mais  
informações deste  
produto

**Produzido por:  
BALANCEFOOT**

**Atendimento ao consumidor**

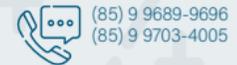

(85) 9 9689-9696  
(85) 9 9703-4005

**Siga a gente em  
nossas redes sociais:**

 /@balance.foot  
balancefoot.com.br