



BALANCE SILIGEL DEDEIRA

Indicações:

Deformidades e afecções nos dedos dos pés, como unhas encravadas, calosidades e dedos em garra com atrito no calçado.

Tipos de Calçados Compatíveis:

- Todos os tipos calçados (Fechados ou Abertos).
- Pode ser utilizado com e sem meias.

Como usar:

Posicione a dedeira no dedão do pé, vestindo-a como uma capa protetora, de forma que todo o dedo fique coberto.

Mecanismo de Ação:

Seu desenho que permite que todo o **dedão fique coberto com uma confortável camada de silicone**, a qual o protege contra atritos e promove o alívio da dor e proteção contra lesões.

Como Lavar, Armazenar e Otimizar a Durabilidade:

- Lavar com água e sabão neutro e secar com toalha. Após a secagem, pode ser adicionado talco para manter o produto seco e sem umidade excessiva (não é obrigatório).
- Mantenha os produtos nas embalagens quando não estiverem sendo utilizados.
- Mantenha a dedeira e o calçados livres de objetos e materiais cortantes, como areia, sujeira e áreas com proeminências e atrito. Evite puxar, tracionar ou tencionar o produto.

Composição: Silicone.

Observação:


Sempre procure um médico ou especialista antes da utilização de qualquer produto. Caso haja piora ou surgimento de alguma dor osteomuscular após sua utilização, procure seu médico.

Accesse para mais informações deste produto




**Produzido por:
BALANCEFOOT**

Atendimento ao consumidor

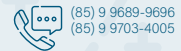

(85) 9 9689-9696
(85) 9 9703-4005

**Siga a gente em
nossas redes sociais:**

 /@balance.foot
balancefoot.com.br