



Balance Foot

PALMILHA BALANCE UPUP (3CM)

Indicações:

- **Aumento da altura em 3 cm** para benefício estético.
- Dores na parte de trás do calcanhar, geradas pela **Tendinopatia do Tendão de Aquiles** (esporão de galo).
- **Discrepância nos membros inferiores de 3cm.**
- No pós-operatório de cirurgias no tendão calcâneo para servir como **salto dentro do imobilizador de tornozelo** e propiciar que o paciente possa andar de forma mais precoce.

Tipos de Calçados Compatíveis:

Todos os tipos de calçados fechados (Sapatos Sociais, Tênis, Sapato-Tênis, Sapatilhas etc) e Órteses (Imobilizadores de Tornozelo).

Como usar:

Retire a palmilha original do calçado temporariamente, **posicione a palmilha de elevação encostada no contra-forte do calçado** (parte de trás do calçado que entra em contato com o calcanhar) e **retorne a palmilha original por cima da BalanceUp.**

Mecanismo de Ação:

Seu desenho propicia **benefício estético de ganho de 3cm** de altura e isso também faz com que o **tendão calcâneo inflamado tenha alívio da dor e do processo inflamatório pela elevação do calcanhar**, promovendo o relaxamento do tendão calcâneo.

Como Lavar, Armazenar e Otimizar a Durabilidade:

- Lavar com água e sabão neutro e secar com toalha. Após a secagem, pode ser adicionado talco para manter o produto seco e sem umidade excessiva (não é obrigatório).
- Mantenha os produtos nas embalagens quando não estiverem sendo utilizados.
- Mantenha a palmilha e o calçados livres de objetos e materiais cortantes, como areia, sujeira e áreas com proeminências e atrito. Evite puxar, tracionar ou tencionar o produto.

Composição: EVA, Tecido em Rede e Espuma com Memória.

Observação:

Sempre procure um médico ou especialista antes da utilização de qualquer produto. Caso haja piora ou surgimento de alguma dor osteomuscular após sua utilização, procure seu médico.

Produzido por:
BALANCEFOOT

Atendimento ao consumidor



(85) 9 9689-9696
(85) 9 9703-4005

**Siga a gente em
nossas redes sociais:**

 /@balance.foot
balancefoot.com.br

**Acesse para mais
informações deste
produto**

