



# Balance Foot

## PALMILHA BALANCE UP (2CM)

### Indicações:

- **Aumento da altura em 2 cm** para benefício estético.
- **Dores na parte de trás do calcanhar**, geradas pela **Tendinopatia do Tendão de Aquiles** (esporão de galo).
- **Discrepância nos membros inferiores de 2cm.**

### Tipos de Calçados Compatíveis:

Todos os tipos de calçados fechados (Sapatos Sociais, Tênis, Sapato-Tênis, Sapatilhas etc) e Órteses (Imobilizadores de Tornozelo).

### Como usar:

Retire a palmilha original do calçado temporariamente, **posicione a palmilha de elevação encostada no contra-forte do calçado** (parte de trás do calçado que entra em contato com o calcanhar) e **retorne a palmilha original por cima da BalanceUp.**

### Mecanismo de Ação:

Seu desenho propicia **benefício estético de ganho de 2cm** de altura e isso também faz com que o **tendão calcâneo inflamado tenha alívio da dor e do processo inflamatório pela elevação do calcanhar**, promovendo o relaxamento do tendão calcâneo.

### Como Lavar, Armazenar e Otimizar a Durabilidade:

- Lavar com água e sabão neutro e secar com toalha. Após a secagem, pode ser adicionado talco para manter o produto seco e sem umidade excessiva (não é obrigatório).
- Mantenha os produtos nas embalagens quando não estiverem sendo utilizados.
- Mantenha a palmilha e o calçados livres de objetos e materiais cortantes, como areia, sujeira e áreas com proeminências e atrito. Evite puxar, tracionar ou tencionar o produto.

## Composição: EVA, Tecido em Rede e Espuma com Memória.

### Observação:

Sempre procure um médico ou especialista antes da utilização de qualquer produto. Caso haja piora ou surgimento de alguma dor osteomuscular após sua utilização, procure seu médico.

**Produzido por:**  
**BALANCEFOOT**

**Atendimento ao consumidor**



(85) 9 9689-9696  
(85) 9 9703-4005

**Siga a gente em  
nossas redes sociais:**

 /@balance.foot  
balancefoot.com.br

**Acesse para mais  
informações deste  
produto**

