



Balance Foot

PALMILHA METATARSALGIA INTEIRIÇA

Indicações:

Dores na região do colchim adiposo distal (**região mais volumosa do solado do pé, logo antes dos dedos**), causadas por doenças que acometem essa região do pé: Metatarsalgia, Neuroma de Morton, Calosidades e Verrugas Plantares e o Encurtamento Muscular da Panturrilha.

Tipos de Calçados Compatíveis:

Todos os calçados fechados, inclusive de bico fino (Sapatos Sociais, Tênis, Sapato-Tênis, Sapatilhas, Scarpin etc).

Como usar:

- Deve ser adquirida uma palmilha de tamanho semelhante ao número do seu pé: PP (33-35), P (36-38), M (39-41) e G (42-44). Após selecionar o tamanho compatível, retire a palmilha original do calçado e a utilize como molde para recortar a palmilha metatarsalgia inteiraça com o mesmo tamanho e contorno.
- Retorne a palmilha original ao calçado e **posicione a palmilha metatarsalgia recortada por cima da palmilha original.**

Mecanismo de Ação:

- A palmilha contém uma **elevação central, chamada de piloto, que tem a função de elevar os ossos** contidos nessa região, fazendo com que a **carga/pressão que passa na parte da frente do pé seja melhor distribuída**, evitando sobrecarga em pontos específicos, o que melhora a inflamação e a dor na planta do pé, próxima aos dedos.
- **A elevação central deve ficar em contato com o pé antes do local da dor**, pois sua função não é acolchoar o local para alívio da dor e sim elevar os ossos e distribuir melhor a carga que passa pelo pé.

Como Lavar, Armazenar e Otimizar a Durabilidade:

- Lavar com água e sabão neutro e secar com toalha. Após a secagem, pode ser adicionado talco para manter o produto seco e sem umidade excessiva (não é obrigatório).
- Mantenha os produtos nas embalagens quando não estiverem sendo utilizados.
- Mantenha a palmilha e o calçados livres de objetos e materiais cortantes, como areia, sujeira e áreas com proeminências e atrito. Evite puxar, tracionar ou tencionar o produto.

Composição: EVA e Poliuretano.

Observação:

Sempre procure um médico ou especialista antes da utilização de qualquer produto. Caso haja piora ou surgimento de alguma dor osteomuscular após sua utilização, procure seu médico

**Produzido por:
BALANCEFOOT**

Atendimento ao consumidor



(85) 9 9689-9696
(85) 9 9703-4005

**Siga a gente em
nossas redes sociais:**

 /@balance.foot
balancefoot.com.br

**Accesse para mais
informações deste
produto**

