



Balance Foot

PALMILHA METATARSALGIA PILOTO ADESIVO

Indicações:

Dores na região do colchim adiposo distal (**região mais volumosa do solado do pé, logo antes dos dedos**), causadas por doenças que acometem essa região do pé: Metatarsalgia, Neuroma de Morton, Calosidades, Verrugas Plantares e o Encurtamento Muscular da Panturrilha.

Tipos de Calçados Compatíveis:

- Todos os tipos calçados (Fechados ou Abertos).
- Utilizado preferencialmente em calçados em que as palmilhas tradicionais não se adaptam, como calçados abertos (Sandálias, Rasteirinhas, Sapatilhas e Chinelos).

Como usar:

- A palmilha é um piloto de tamanho único com um adesivo na parte de baixo.
- **Destaque o adesivo da parte de baixo do piloto e cole a palmilha de forma longitudinal** (parte estreita posterior e a parte larga anterior) na **região central do calçado**, um pouco antes do ponto que entra em contato com o local da dor no pé.

Mecanismo de Ação:

- A palmilha é basicamente uma elevação, chamada de **piloto, que tem a função de elevar os ossos contidos no centro do pé**, fazendo com que a **carga/pressão que passa na parte da frente do pé seja melhor distribuída**, evitando sobrecarga em pontos específicos, o que melhora a inflamação e a dor na planta do pé, próxima aos dedos.
- **A palmilha deve ficar em contato com o pé antes do local da dor**, pois sua função não é acolchoar o local para alívio da dor e sim elevar os ossos e distribuir melhor a carga que passa pelo pé.

Como Lavar, Armazenar e Otimizar a Durabilidade:

- Lavar com pano umedecido e secar com papel toalha. Após a secagem, pode ser adicionado talco para manter o produto seco e sem umidade excessiva (não é obrigatório).
- **NÃO tentar removê-la do calçado ou trocá-la de calçado, pois irá perder sua propriedade adesiva.**
- Mantenha a palmilha e o calçados livres de objetos e materiais cortantes, como areia, sujeira e áreas com proeminências e atrito. Evite puxar, tracionar ou tencionar o produto.

Composição: Poliuretano e Espuma de Borracha.

Observação:

Sempre procure um médico ou especialista antes da utilização de qualquer produto. Caso haja piora ou surgimento de alguma dor osteomuscular após sua utilização, procure seu médico

Produzido por:
BALANCEFOOT

Atendimento ao consumidor



(85) 9 9689-9696
(85) 9 9703-4005

Siga a gente em
nossas redes sociais:

 /@balance.foot
balancefoot.com.br

Acesse para mais
informações deste
produto

